

## PCR-Spucktests Auf einen Blick

### Wichtig:

1.5 Std. vor der Durchführung des PCR-Spucktestes keine Mahlzeiten einnehmen und nur Wasser trinken.

Das Test-Kit besteht aus:

- a. Teströhrchen
- b. Drehverschluss
- c. Trichter mit Drehverschluss
- d. Salzwasserlösung
- e. Anleitung



Die Testschritte dazu sind:

1. Beutel öffnen.
2. Trichter auf das Teströhrchen schrauben.
3. Salzwasserlösung in den Mund füllen und 60 Sekunden gut spülen. **Nicht schlucken!**
4. Gespülte Salzwasserlösung via Trichter in das Teströhrchen füllen.
5. Trichter beim Teströhrchen abschrauben und mit dem Drehverschluss schliessen.
6. Teströhrchen in den Beutel stecken, diesen verschliessen und der Lehrperson übergeben.